

Version	A	Date de validation	27/02/2018
Type de texte	VISKALI MP	Mise en application	15/03/2018
Dernière(s) modification(s) du document :			

MATERIEL

Boîte de pétri ou flacon stérile
Ecouvillons DACRON +/-milieu de transport
Curettes
Pince à épiler
Vaccinostyle
Coupe-ongles.
Lames en verre
Eau physiologique
Scotch éventuellement
Gants à usage unique

PRELEVEMENT

Lésion cutanée

Gratter avec une curette en périphérie de la lésion (bourrelet), récupérer des squames dans une boîte de Pétri.
Si pas de squame, passer un écouvillon préalablement humidifié avec de l'eau physiologique stérile.

Malassezia furfur = Pityriasis versicolor= Pityrosporum ovale : repérer les lésions décolorées et recueillir les squames à l'aide d'un morceau de scotch. Le coller sur une lame avant transport.

Ongles (onyxis)

Couper la partie atteinte périphérique et la jeter, gratter à la curette ou vaccinostyle l'ongle à la frontière zone saine/zone atteinte , recueillir la poudre au niveau du lit de l'ongle dans une boîte de Pétri.

Cuir chevelu (teignes)

Prélever au niveau de la zone d'alopecie (sans cheveux), les squames, cheveux cassés, croûtes avec une curette, une pince à épiler. Mettre dans une boîte de Pétri.
Si pas de squame, gratter puis écouvillonner (2 écouvillons humidifiés avec eau physiologique)

Poils (folliculites)

Prélever à la pince à épiler quelques poils et les mettre dans une boîte de pétri.
Ecouvillonner si suintant (2 écouvillons).

Plis (inter-orteils, inguinal, aine,..)

Prélever à la périphérie de la lésion par grattage à la curette et récupérer les squames dans une boîte de pétri +/- écouvillon humidifié avec eau physiologique
Si pas de squame : 2 écouvillons humidifiés avec eau physiologique.

Doigt (péri onyxis)

Presser le bourrelet inflammatoire à la base de l'ongle, écouvillonner le pus (2 écouvillons).

Quel que soit le prélèvement mycologique effectué :

Le matériel réutilisable est placé dans les boites spécifiques identifiées en attente de leur décontamination puis stérilisation.